

# iridina® tears

10 ml-es flakon

## HIDRATÁLÓ ÉS NEDVESÍTŐ SZEMCSEPP

**Hosszan tartó hidratálás  
Kontaktlencsével is használható**

Az **iridina tears** 0,4%-os nátrium-hialuronát tartalmú szemcsepp egy steril, oldatos, fiziológiai pH értékű, nátrium-hialuronát alapú szemcsepp. Az oldat tartósítószer-mentes, és többadagos, praktikus, 10 ml-es flakonban kerül forgalomba.

A nátrium-hialuronát, a szemcseppnek (az orvostechnikai eszköznek) nyálkahártya hidratáló és viszkoelasztikus tulajdonságot nyújt, amely ezáltal biztosítja a szemfelület megfelelő hidratálását és védi a szemmozgások okozta súrlódásokkal szemben. Ezen túlmenően a polimer képes megtartani a vizet: így az oldat a szem felületét nedvesen tartja és megnöveli a könnyfilm stabilizációját, megvédve a nyálkahártyát a külső hatásokkal szemben.

Az oldat bórsavat és nátrium-tetraborát-dekahidrátot tartalmaz, amely biztosítja a nedvességtartalmat, míg a nátrium-klorid pedig fiziológiás oldatként van jelen.

Emiatt a 0,4%-os nátrium-hialuronát tartalmú szemcsepp hidratálja és nedvesíti a szem felületét, és azonnali megkönnyebbülést okoz égető érzés, irritáció és a szemszárazsághoz kapcsolódó kellemetlen tünetek esetén. A 0,4%-os nátrium-hialuronát koncentráció lehetővé teszi **a nagyobb hidratálást hosszabb időn keresztül.**

A 0,4%-os nátrium-hialuronát tartalmú szemcsepp használható kontaktlencse használata esetén is, anélkül, hogy a lencsét ki kellene venni. A szemcseppet gyermekek is használhatják az orvossal történő előzetes konzultációt követően.

A többadagos, tartósítószer-mentes innovatív rendszer (osd-ophtalmic squeeze dispenser) révén a 0,4%-os nátrium-hialuronát tartalmú szemcsepp egyesíti a tartósítószer-mentes egyadagos oldatok előnyeit a többadagos flakon praktikusságával.

### INDIKÁCIÓ

A 0,4%-os nátrium-hialuronát tartalmú szemcsepp

hidratálja és nedvesíti a szem felületét, így nedvességgel látja el és megkönnyebbülést okoz az irritált szem nyálkahártyájának akkor, amikor a szemszárazság által okozott problémák jelentkeznek. A leggyakoribb okok, amelyek szemszárazságot és irritációt okozhatnak, a következők:

- Kontaktlencse folyamatos használata sok órán keresztül;
- Környezeti hatások (légkondicionáló, hosszan tartó napsütés, szél, füst, légszennyezés);
- Túl sok órányi tanulás, számítógép használat és szemszárazság szindróma által okozott száraz szem;
- Szemműtét után kialakuló stressz.

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az iridina tears (orvostechnikai eszköz) ajánlott kontaktlencsét viselők számára is.

A szemcseppet gyermekek is használhatják az orvossal történő előzetes konzultációt követően.


Vegye le a védőgyűrűt a kupakról az első használat előtt.

A flakon egyedi jellemzője miatt, miután tartósítószer-mentes oldatot tartalmaz, annak folyamatos csökkenésével egyre nagyobb nyomást kell gyakorolnia a flakonra, hogy kicseppenjen a szemcsepp.

Cseppentsen 1-2 cseppet mindegyik szembe a flakon enyhe megnyomásával.

Használat után azonnal zárja vissza a flakont: a flakon tartalma az első használatától számított 6 hónapon belül használható fel.

Gyakori használatra ajánlott, akár naponta többször is, szükség esetén vagy az orvos utasításai alapján.

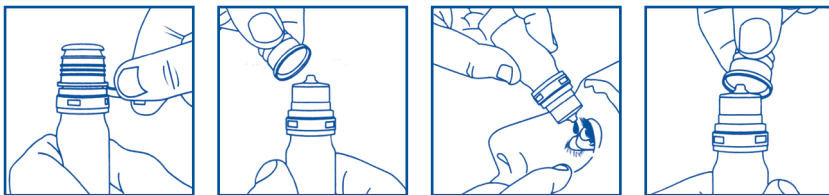

A látás ideiglenesen elhomályosulhat a termék használatát követően. Ha ez a hatás hosszan fennáll vagy rosszabbodik, forduljon orvoshoz.

### ÖSSZETÉTEL

Nátrium-hialuronát, bórsav, nátrium-tetraborát-dekahidrát, nátrium klorid, injekcióhoz való steril víz.

**Tartósítószereket nem tartalmaz.**

### HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék kizárólag szemészeti célra használható külsőleg.
- A flakont csak ugyanazon személy használhatja.
- Ne használja a terméket, ha a flakon az első kinyitáskor már sérült vagy nem tökéletesen zárt.
- Az alkalmazás során ne érintse meg sem a szemet, sem más felületet a flakon cseppentő részével.
- Ne használja a terméket, ha allergiás a készítmény bármelyik hatóanyagára.
- Nemkívánatos mellékhatások esetén azonnal fejezze be a használatát és forduljon orvoshoz.
- A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza a terméket.
- A lejárati idő csak bontatlan és megfelelően tárolt készítményre vonatkozik.
- Gyermekektől elzárt helyen tartandó.

### NEMKÍVÁNT HATÁSOK

Egészen mostanáig nem jegyezték fel semmilyen mellékhatást.

### CSOMAGOLÁS

10 ml-es flakon, tartósítószer-mentes.

### TÁROLÁSI FELTÉTELEK

30°C alatti hőmérsékleten tárolja.

A többadagos szemcsepp az **első felnyitástól számított 6 hónapig használható.**

### FELHASZNÁLHATÓSÁG

A csomagoláson feltüntetett időpontig használható bontatlan termék esetén.



COC Farmaceutici s.r.l.  
Via Modena 15 40019 Sant'Agata Bolognese (BO)

### Forgalmazó:

Ultra Marketing Kft.  
1145 Budapest, Mexikói út 33.

Utolsó felülvizsgálat: 01.01, 2015.07.



ORVOSTECHNIKAI  
ESZKÖZ

STERILE A

029711150902